

 Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband München	Qualitätsmanagementhandbuch	Kapitel
Abteilung AI/RD	Sonderbetriebsanweisung Umgang mit Sauerstoffflaschen in Fahrzeugen	

Zur sicheren Verlastung von Sauerstoffflaschen, hier vornehmlich die beiden 10 Liter Sauerstoffflaschen in Rettungswagen, ergeht bis auf weiteres folgende Anweisung.

Bei jeder Fahrzeugübernahme muss die modifizierte Halterung der o. g. Sauerstoffflaschen auf sicheren Halt überprüft werden.

Folgende Punkte sind hierbei besonders aufmerksam zu prüfen.

1. Sitz des Gummipuffers im Verschlussbügel sowie dessen Formschluss mit den Sauerstoffflaschen. Stehen die Flaschen bewegungsfrei in der Halterung? Ist der Verschlussbügel geschlossen?



 Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband München	Qualitätsmanagementhandbuch	Kapitel
Abteilung AI/RD	Sonderbetriebsanweisung Umgang mit Sauerstoffflaschen in Fahrzeugen	

2. Antirutschmatte am Boden.
Liegt diese glatt und stehen die Flaschen sicher auf?



Sollten die Sauerstoffflaschen nicht bewegungsfrei in der vorgesehenen Halterung zu montieren sein, ist umgehend der Wachleiter der RW 02 zu kontaktieren und mit ihm das weitere Vorgehen abzusprechen.

Hiermit bestätige ich die Einweisung in diese Sonderbetriebsanweisung und bestätige, dass ich diese verstanden habe.

München den _____

Vorname Nachname

Unterschrift